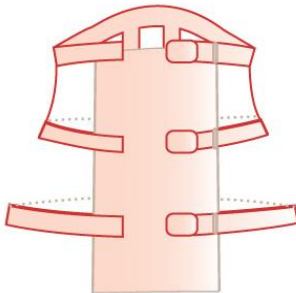
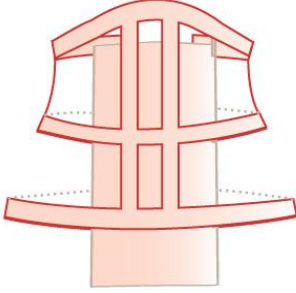


CIVC 2 : corset d'immobilisation vertébrale **sur mesure**

Le corset textile (par rapport à la solution thermoformée) offre un confort accru grâce à la souplesse des matériaux utilisés tout en garantissant l'immobilisation prescrite.

Prescription : pathologie grave du rachis lombaire, immobilisation dorso-lombaire.

<p style="text-align: center;">CIVC 2</p> <p><u>Remboursement</u> : oui</p> <p><u>Essayage</u> : oui</p> <p><u>Renouvelable</u> : chaque année</p> <p><u>Adjonctions possibles</u> : oui</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ assurer la fixité □ améliorer l'application et le maintien ◆ pathologie spécifique 	<p>Face</p>  <p>Dos</p> 	<p>Application :</p> <p>prescrit dans le cas de lésion rachidienne pathologique grave entraînant des répercussions algofonctionnelles importantes, le corset limite les mouvements antéropostérieurs du rachis et les flexions latérales.</p> <p>Hauteur d'application supérieure à D6.</p> <p>La cage ajourée favorise l'activité du patient actif. Il convient de privilégier le CIVC 1 pour les patients corpulents (le Coutil renforcé contient la ptose abdominale).</p>
--	--	---

fermeture	<ul style="list-style-type: none"> 1 fermeture réglable «devant»: bouclage par brides (côté droit ou gauche) préciser la position sur la fiche de mesure
fermeture supplémentaire	non
maintien	<p>forme «cage fermée ajourée»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 aciers ressorts « devant » (largeur 13mm/épaisseur 3,5) - 2 aciers ressorts « dos » (largeur 20mm/épaisseur 12) - 1 fourche «scapulaire» (largeur 20mm/épaisseur 12) - 2 fourches ressort «latérales» (largeur 20mm/épaisseur 12) - 1 acier ressort «lombaire» (largeur 20mm/épaisseur 12)
choix matière et coloris	<ul style="list-style-type: none"> cage capitonnée plastron Coutil Coton
renfort	<ul style="list-style-type: none"> plastron abdominal doublé coton
options	<ul style="list-style-type: none"> plastron élastique (damier) doublage «plastron devant» confort : mousse ou suédine

Adjonctions	informations à apporter sur la fiche de mesure
<input checked="" type="checkbox"/> Pattes d'entrejambe amovible (1 paire)	fixée par velcro sur « plastron » et « ressort lombaire »
<input type="checkbox"/> Bretelle (anté flexion du tronc) si prolongement au niveau de la zone scapulaire	fixation par « microgrip » et réglage par «boucle à coulisse » préciser la hauteur
<input type="checkbox"/> Épaulière (anté flexion du tronc) si nécessité de correction au niveau de la ceinture scapulaire	préciser la longueur de la sangle dorsale en cm préciser le côté à maintenir : droit ou gauche
<input type="checkbox"/> Béquillon réglable (sous axillaire)	préciser la hauteur du tuteur latéral en cm et le «côté» d'application